

ТЕРМОКОНТРОЛЬ

Информация о продукте:

Название: Браслет «Термоконтроль»

Материал: силикон, термохромные микрокапсулы, наносеребро

Как использовать: одеть на запястье.

Страна производства: Южная Корея

Производитель: JD IDEAS CO.,LTD, патент 10-2020-008085

Представитель в России: ООО «СМАРТ ДИАГНОСТИКА»,

119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 88, корпус 3, офис 100, тел.: 8 (499) 138-19-91,

www.checkband.ru, info@checkband.ru

ИНСТРУКЦИЯ:

Внимание! Этот продукт не является медицинским изделием. Если цвет браслета изменился, рекомендуется использовать термометр для получения точного значения температуры тела.

- Вскрыть упаковку, достать браслет, надеть его на запястье или на предплечье.
- Браслет можно носить постоянно при условии, что он достаточно плотно прилегает к запястью, но не сдавливает сосуды (в этом случае длительное ношение может нарушить кровообращение).
- Чем лучше контакт с телом, тем легче происходит изменение цвета. Поэтому рекомендуется, чтобы браслет плотно прилегал к запястью.
- Когда температура кожи запястья превысит 37,5 градусов Цельсия, цвет браслета начнет постепенно меняться. (Могут быть некоторые отклонения из-за температуры окружающей среды, толщины браслета и точности измерительного прибора). Точность самого браслета составляет 0,2 градуса Цельсия.
- Внешние воздействия (например, низкая температура) могут помешать изменению цвета.
- Под действием прямых солнечных лучей происходит естественная потеря цвета, но это не влияет на функцию.
- Из-за характеристик силикона изделие может деформироваться при длительном воздействии высоких температур.
- Не изменяйте и не обрабатывайте продукт по своему усмотрению, не воздействуйте на браслет непредусмотренным образом.
- Этот продукт прошел испытания на безопасность, но если вас беспокоит аллергия или другие проблемы с кожей, его рекомендуется использовать после консультации с врачом.

← Пожалуйста, приложите запястье левым краем. Ваш размер **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **L**
Охват (мм) 110 | 125 | 141 | 157 | 173 | 189

*Размер может отличаться в зависимости от телосложения